

CE



Kloubová loketní ortéza

050

Jednoosý kloub



HANDICAP

Kloubová loketní ortéza 050 (jednoosý kloub)

URČENÝ ÚČEL

Kloubová loketní ortéza 050 je určena k imobilizaci loketního kloubu s možností individuálního nastavení rozsahu pohybu při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti loketního kloubu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí stabilizaci v loketním kloubu s možností individuálního nastavení rozsahu pohybu lokte pomocí kloubu.

INDIKACE

- Měkkotkáňová poranění loketního kloubu.
- Pooperační stavy loketního kloubu vyžadující limitovanou stabilizaci.
- Doléčení stavů po distorzích, kontuzích lokte.
- Lehké degenerativní změny.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Neznámo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, polyamid (PAD) 20%, bavlna 15%, polyester (PES) 5%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



*Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .*




HANDICAP, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 11/2024


POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

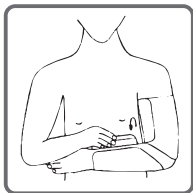


1

Sundejte fixační dlahy a pásy.
Nasaďte a zapněte měkkou
bandáž.

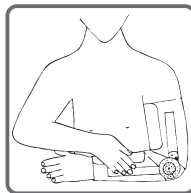


2

Vystředte kloub, zkontrolujte
správnou pozici ortézy.

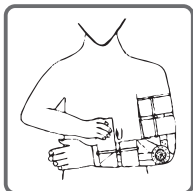

3

Přilepte a zapněte pásy.
Zkontrolujte, zda nejsou
příliš utažené.

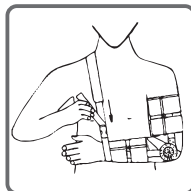

4

Zavěste postiženou končetinu
na přiložený popruh.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK