

CE

Kloubová rehabilitační ortéza

001B

Jednoosý kloub



HANDICAP

Kloubová rehabilitační ortéza 001B

URČENÝ ÚČEL

Kloubová rehabilitační ortéza 001B je určena k imobilizaci kolenního kloubu s možností individuálního nastavení rozsahu pohybu při pooperačních a poúrazových stavech, onemocněních nebo pro pacienty s neurologickým či svalovým deficitem.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mediolaterální stabilizaci v kolenním kloubu s možností individuálního nastavení rozsahu pohybu pomocí kloubu.

INDIKACE

- Měkkotkáňová poranění kolenního kloubu.
- Pooperační stavy kolenního kloubu vyžadující limitovanou stabilizaci
- Doléčení stavů po distorzích, kontuzích kolene.
- Lehké degenerativní změny.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60%, polyamid (PAD) 20%, bavlna 15%, polyester (PES) 5%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřeně rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



*Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .*



HANDICAP, a. s.
Benešov 71, 679 53
Česká republika

Datum poslední revize: 1.6.2026

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1

Rozepněte pásky a sundejte klouby. Nasadte a zapněte měkkou bandáž.



2

Přiložte oba klouby tak, aby byly umístěny na boku kloubu. Duralové výztuhy by měly kopírovat osu stehenní a holenní kosti.



3

Zapněte pásky ve správném pořadí viz obrázek a zkontrolujte dotažení.

OTVOR NA VÍČKU



ARETAČNÍ TLAČÍTKO

4

Nastavení kloubu:

- Otvor na plastovém víčku natočte k jednomu ze 2 oranžových tlačítek (první slouží k nastavení flexe, druhé k nastavení extenze).
- Zamáčknutím oranžového tlačítka dojde k uvolnění aretačního kolíku a bude možné nastavovat požadovaný stupeň extenze či flexe.
- Otvor na víčku pootočte od oranžového tlačítka. Tím dojde k zamezení nechtěného zamáčknutí tlačítka.

Před praním zapněte suché zipy a odejměte klouby.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



ČESKÝ VÝROBEK