

CE



Kloubová
rehabilitační
ortéza

001B

Jednoosý kloub



HANDICAP

Kloubová rehabilitační ortéza (jednoosý kloub) 001B

INDIKACE

- Po úrazech a operacích kolenního kloubu
- Stavů po náhlých mozkových příhodách

KONTRAINDIKACE

- Trombóza hlubokých žil dolní končetiny
- Tromboflebitida
- Doporučujeme s ortézou nosit i kompresivní punčochu

FUNKCE

- Fixuje

HLAVNÍ MATERIÁL

- (Satex) 100% polyamid + PUR (PU-Foams) + (Leny) 100% bavlna

ÚDRŽBA

- Perte jen snímatelné molitanové polstrování
- V mokřém stavu natáhněte a nechte uschnout
- Perte v jemných pracích prostředcích
- Zbytky pracích prostředků mohou způsobit podráždění kůže

USKLADNĚNÍ

- Na suchém místě, v pokojové teplotě, ne na přímém slunci

DŮLEŽITÉ

- Správné nasazení je nesmírně důležité pro funkci pomůcky
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborného personálu
- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu
- Drobnější uzpůsobení výrobku je možné za asistence vyškoleného odborného personálu
- Výrobek by měl být používán pouze k předepsaným účelům
- Přílišné utažení pásky vede k otokům periferie
- Nedostatečné upnutí pásků a nesprávné usazení končetiny snižuje funkci pomůcky
- Jestliže se nenadále objeví bolest, otok nebo necitlivost prstů, uvolní pásky
- Když potíže neustoupí, informujte svého lékaře.
- Pokud je výrobek použitý pro víc než jednoho pacienta, ztrácí záruku od výrobce

Datum poslední revize: 1.5. 2016

POKYNY K NASAZENÍ




- 1** Sundejte fixační klouby a pásky. Nasadte a zapněte měkkou bandáž.



- 2** Přiložte oba klouby (kloub by měl ležet laterálně ve středu kolene).



- 3** Zapněte pásky ve správném pořadí (viz obrázek) a zkontrolujte dotažení.

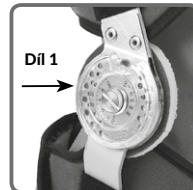

- 4** Nastavení kloubu:
 - a) Zamáčkněte aretovací kolíček tak, aby se dalo pootočit plastovým víčkem.
 - b) Výřez plastového víčka otočte nad požadované stupně aretace.
 - c) Zasuňte kolíček a víčko vraťte na aretovací kolíček tak, aby vyskočil.



HANDICAP A. S.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE




*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap a.s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY

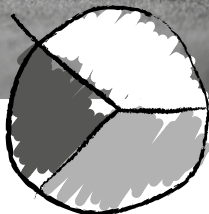

ČESKÝ VÝROBEK