

medi Hospitalbutler

Patentovaná navlékáč pomůcka pro použití v každodenní nemocniční péči a na operačním sále.

Návod k použití:



1)

Povytažením zámku můžete následně upravit průměr navlékače medi Hospitalbutler tak, aby mohl být tažen přes pacientův kotník a lýtko bez kontaktu s dolní končetinou.



2)

Punčochu vložte do vnitřního rámu navlékače.



3)

Horní část punčochy ohrňte přes rám a punčochu shrňte dál, dokud se na hraně rámu neobjeví barevné označení (= pata punčochy). Punčocha je tak na navlékači naruby.



4)

Po vsunutí chodidla do vnitřního rámu navlékač medi Hospitalbutler tlačte přes kotník až k pacientově kolenu, pokud je to možné. Navlékač následně stáhněte zpět a punčochu povytáhněte nahoru přes stehno.



5)

Na závěr punčochu na končetině rovnoměrně vyhladte.