

medi Thumb support

Informace o účelu použití

medi Thumb support je palec ortéza. Výrobek je určen výhradně k ortetické terapii palec, pokožka v oblasti přiložení ortézy nesmí být poškozená nebo poraněná.

Indikace

- Rizartróza
- Poranění v oblasti karpometakarpálního (CMC) kloubu palce

Kontraindikace

Doposud nejsou žádné známy.

Jak ortéza působí?

Znehybnění a stabilizaci kloubu palce zabezpečuje hliníková dlahu.

Jak často a kdy se má ortéza nosit?

Pouze důsledným nošením ortézy medi Thumb support napomůžete úspěšnému průběhu terapie.

Jak se ortéza přikládá?

- Dlahu, kterou Váš specializovaný prodejce příslušně vytvaroval, zasuněte do kapsy.
- Otevřete pásy a ruku vložte do ortézy (hliníková dlahu je dole).
- Zapněte nejdříve palcový popruh.
- Poté široký popruh na zápěstí

Pokyny k praní

Před praním uzavřete pásky na suchý zip a odstraňte dlahy kloubu. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

Materiálové složení

Lycra, hliník

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

Váš tým medi

Vám přeje rychlé uzdravení!