



## Ortéza zápěstí a prstů ruky

# 046

S fixací prstů, dlouhá, univerzální strannost



HANDICAP

# Ortéza zápěstí a prstů ruky 046

## URČENÝ ÚČEL

Ortéza zápěstí a prstů ruky 046 je určena k fixaci předloktí, zápěstí a prstů ruky při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti zápěstí a předloktí.

## VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udrží semirigidní fixaci v oblasti distálního předloktí, karpu a prstů až po distální interfalangeální klouby přiložením rigidní tvarovatelné dlahy volárně.

## INDIKACE

- Léze nervus radialis veškeré etiologie.
- Zánětlivá onemocnění šlach zápěstí a ruky.
- Vysoké léze extenzorového šlachového aparátu.
- Některé typy šlachových transpozic.

## KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

## ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

## MATERIÁL

Polyester (PES) 70%, polyamid (PAD) 25%, elastan 5%.

## CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




## UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

## LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

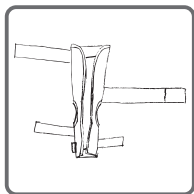

**1**


Rozepněte všechny pásky.  
Duralová dlahu může být tvarovaná dle  
potřeby odborným personálem.

Vsuňte postiženou ruku do ortézy.



**2**

Zapněte pásky  
a regulujte dotažení.

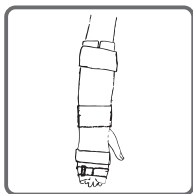

**3**

Zkontrolujte správnou  
pozici ortézy a dotažení  
pásků.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perle nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK