

CE



Břišní pás stomický  
**255**



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

## Břišní pás stomický 255

### URČENÝ ÚČEL

Břišní pás 255 stomický je určen ke zpevnění tonu břišní stěny při pooperačních stavech či onemocněních v oblasti břicha.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Fixuje a zpevňuje břišní stěnu pomocí elastického tahu a otvor umožňuje protažení stomického sáčku.

### INDIKACE

- Stavby po operaci břicha se založenou stomií.
- Parastomální kýla.

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polyester (PES) 45%, polyamid (PAD) 40%, bavlna 10%, elasthan 5%.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

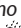

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




HANDICAP, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 11/2024


# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

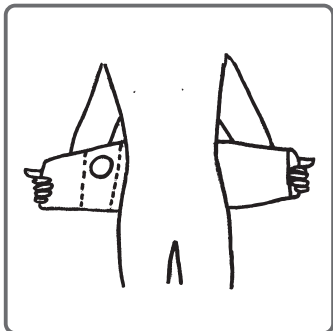

**1**

Obtočte břišní pás kolem pasu a provlečte stomický sáček otvorem pro stonii.

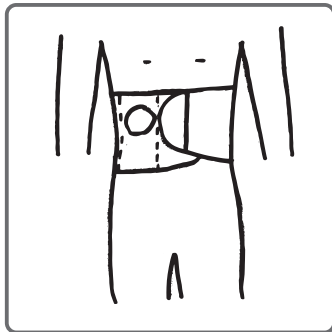

**2**

Dotáhněte a zapínejte od spodního okraje nahoru. Přesvědčte se, zda háčky suchého zipu nepřesahují textilii, aby nepoškodily kůži nebo oblečení.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.



Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*

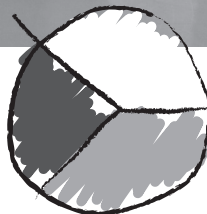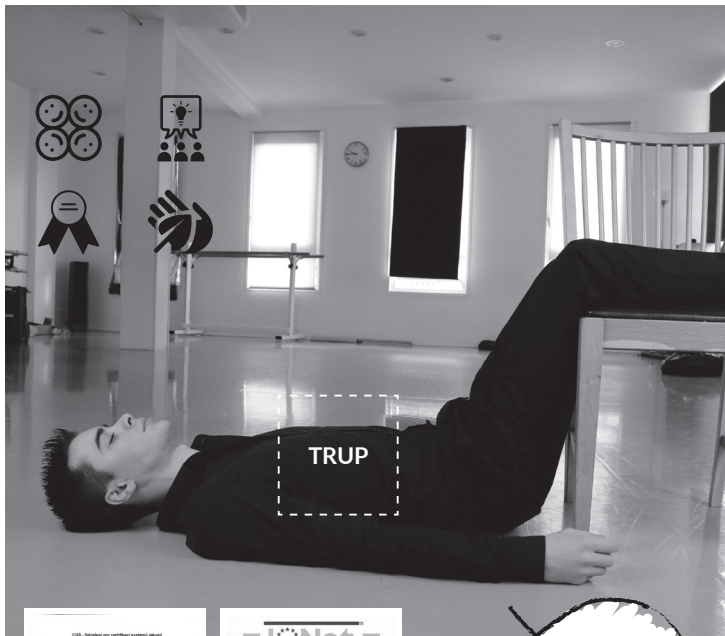

ČESKÝ VÝROBEK