

CE

Peroneální
páska
062



HANDICAP

Peroneální páska 062

URČENÝ ÚČEL

Peroneální páska 062 je určena k flexibilní fixaci středního postavení chodidla v hlezenním kloubu při oslabení dorsiflexe hlezna.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Zajišťuje polohu hlezna ve středním postavení za pomoci standardní obuvi a tím brání nechtěné plantiflexi hlezna.

INDIKACE

- Léze nervus peroneus veškeré etiologie.
- Onemocnění projevující se poruchou svalové fixace hlezna.
- Stavby po operacích s oslabením aktivní dorsiflexe nohy.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyamid (PAD) 35%, polyuretan (PUR) 25%, polyester (PES) 20%, bavlna 15%, elastan 5%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřeně rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek  je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



HANDICAP, a. s.
Benešov 71, 679 53
Česká republika


POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka




1

Základní díl pásky omotejte kolem lýtku a zajistěte pomocí suchého zipu.

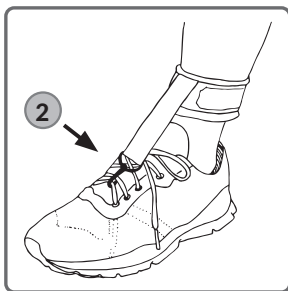

2

Háček na pružence přichyťte ke tkaničce, čímž zajistíte tah.

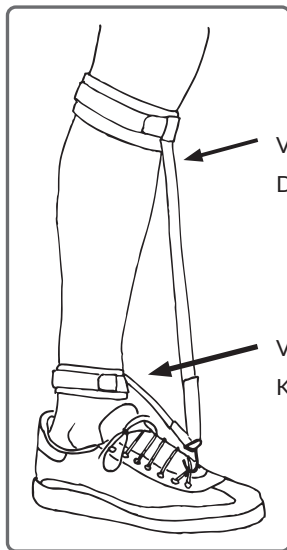

Velikost 2

Dlouhý popruh

Velikost 1

Krátký popruh

3

Varianta pásky: krátká a dlouhá

- a) krátká se upíná nad kotníkem
- b) dlouhá se upíná pod kolenem

*Před praním zapněte suché zipy.
Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce
na šetrný program při teplotě 30°.
Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky
pracího prostředku mohou způsobit
podráždění kůže a vést k rychlejšímu
opotřebení materiálů.*



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



ČESKÝ VÝROBEK