

# protect.Clavicle support

---

## Informace o účelu použití

protect.Clavicle support je ortéza na klíční kost. Výrobek je určen výhradně k ortotickému ošetření klíční kosti, a to pouze na neporušenou kůži.

---

## Indikace

- Posttraumatické a pooperační fraktury
- Akromio-klavikulární luxace

## Kontraindikace

- Komprese dýchacích cest.
- Komprese svazku cévních nervů.

## Návod na aplikaci

Dodává se přímo pro použití. Bez dalšího nastavování, stříhání, podkládání a zavazování jako u tradičních hadicových obvazů. Značnou úsporu času jistě záhy oceníte.

1. Část A přetáhněte přes hlavu a části B a C položte přes ramena (viz obr. 1).
  2. Pásy B a C vedte podpažím a provlékněte oky 1 a 2. Na zádech nastavte délku pásů a na vlastní spodní straně je fixujte tak, že je přitlačíte zápěstím.
- 

## Pokyny k praní

Perte ručně v jemné, studené mýdlové vodě. Důkladně vypláchejte v čisté vodě. Neždímejte. Sušte na vzduchu. Nežehlete. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu. Výrobek lze nosit a používat jak ve sladkých tak i ve slaných vodách. Po použití ve vodě výrobek řádně vypláchněte v čisté vodě. Nechte vysušit na vzduchu. Skvrny odstraňte benzínem nebo chemickými čistícími prostředky.

---



## Pokyny pro skladování

Výrobku skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

## Materiálové složení

Polyester, bavlny, polyamid

## Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

## Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.