

protect. Lumbaforte

Informace o účelu použití

protect.Lumbaforte je bederní orteza. Vyroben je určen vyhradně k použití po odbornem nasazení na dolní část páteře a pouze na nepoškozenou kůži.

Indikace

- Instabilita páteře, svalová
- Stavby podráždění ilio-sakrálního kloubu.
- Rozvolnění symfýzy.
- Ligamentosy
- Syndrom po odstranění ploténky.
- Bolestivé stavy v lumbosakrálním přechodu

Kontraindikace

V současné době nejsou známe.

Funkce

Bederní páteř je citelně odlehčena a podpořeno zádové svalstvo. Jsou zmírněny bolesti v kříži a natažení svalů. Pokyny k nošení Jen správné nošení protect.Lumbaforte podpoří úspěch terapie. Nedoporučí-li lékař jinak, pak bandáž odložte asi na 2 hodiny nejpozději po 8 hodinách. Poté můžete bandáž zase přiložit.

Pokyny k nošení

Jen správné nošení protect.Lumbaforte podpoří úspěch terapie. Nedoporučí-li lékař jinak, pak bandáž odložte asi na 2 hodiny nejpozději po 8 hodinách. Poté můžete bandáž zase přiložit.

Návod k oblékání

- Bandáž oviňte kolem těla (obrázek 1). K tomu účelu vložte prsty do předem připravených úchytných smyček.

- Nyní levou stranu přitiskněte na břicho. Na ni přiložte pravou stranu tak, aby mohly být strany spojeny suchým zipem. (obrázek 2)
- Bandáž posuňte dolů tak, aby spodní okraj bandáže seděl těsně nad tříselem (obrázek 3). Bandáž vždy noste pod oblečením.

Pokyny k praní

Pásy na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebením materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny ke skladování

Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Materiálové složení

Polyester, Polyamid, PU

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.