

CE



Ramenní bandáž **023**



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Ramenní bandáž 023

URČENÝ ÚČEL

Ramenní bandáž 023 je určena k mírné fixaci ramenního kloubu při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti ramene.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Mírně imobilizuje ramenní kloub ve středním postavení.

INDIKACE

- Měkkotkáňová poranění ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, vazová poranění).
- Doléčení po subluxaci glenohumerálního kloubu.
- Pooperační stavy s nutností mírné imobilizace ramenního kloubu.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

4 mm chloropren (neopren) (90%)
+ Polyamid (PAD) 10%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



*Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .*



HANDICAP, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 11/2024


POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1

Rozepněte popruh a vsuňte postiženou končetinu do neoprenového návleku.

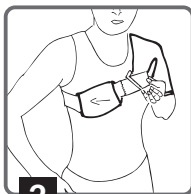


2

Volný konec vsuňte do poutka a zapněte.


Polstrování musí být vystředěno v podpaží.

Pokud je popruh příliš dlouhý nebo krátký, upravte délku v zádové části (obr. 3).

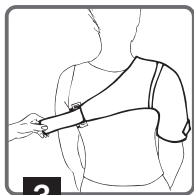


3

Nastavte délku popruhu, aby podpažní polstrování bylo vystředěno a ortéza měla dostatečný tah.

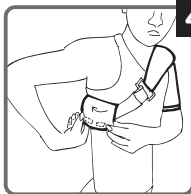

4

Upravte polstrování v podpaží tak, aby popruh nikde netlačil.

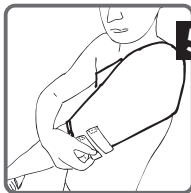

5

Zapněte pásky na paži.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK