

CE



Ortéza ramenního
kloubu

Desault



HANDICAP

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

Video
instruktáž
k použití.



Scan me!



1

Vsuňte postiženou končetinu do závěsu díl (1), popruh vedte přes zdravé rameno šikmo přes záda. Popruh zkraťte dle potřeby tak, aby loket svíral 90°.

(Pinzetu z háčku suchého zipu sundejte, popruh ustrihněte a pinzetu znovu nasadte).



2

Konec popruhu přilepte na závěs v oblasti zápěstí.



3

Přiložte opatrně hlavní ramenní díl (2) na postižené rameno. Díl (2) je oboustranný, obraťte dle potřeby a obtočte kolem hrudníku.

Zapněte dva přední tahy tak, aby zápěstí postižené končetiny leželo uprostřed.

**4**

Přes háčky suchého zipu ohněte konce tahů a přilepte, aby vás háčky nepíchnaly.

**5**

Přiložený loketní díl (3) zapněte na díl (2) v zádové části a druhý konec zapněte na přední část dílu (2) tak, abyste podepřeli loket fixovaného ramene.

**6**

Pro rehabilitaci lokte rozepněte spodní hrudní díl (3), který vede pod žebry (pro jednodušší orientaci je označen červeně) a dále rozepněte závěs paže díl (1) zatažením za etiketu lift.

**7**

Dle potřeby můžete rozepnout i přidavný díl na podporu lokte, čímž paži uvolníte a můžete procvičovat loket.

Po procvičení vše znovu zapněte.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



Ortéza ramenního kloubu Desault

URČENÝ ÚČEL

Ortéza ramenního kloubu Desault je určena k imobilizaci ramene a odlehčení závěsného aparátu při pooperačních a poúrazových stavech.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Imobilizuje ramenní kloub v abdukci a mírné vnitřní rotaci.

INDIKACE

- Měkkotkáňová poranění ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, vazová poranění)
- Doléčení po repozici luxace glenohumerálního či akromioklavikulárního kloubu
- Doléčení kostních poranění (konzervativní terapií či doléčení po operaci)
- Pooperační stavy s nutností imobilizace ramenního kloubu v abdukci s mírnou vnitřní rotací

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 80%, polyamid (PAD) 20%

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **(MD)** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic