

CE



Ortéza zápěstí
040



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Ortéza zápěstí 040

URČENÝ ÚČEL

Ortéza zápěstí 040 je určena k fixaci zápěstí a předloktí ve středním postavení při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti zápěstí a předloktí.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udržuje semirigidní fixaci v oblasti distálního předloktí a karpu za pomocí rigidní tvarovatelné dlahy a bočních výztuh.

INDIKACE

- Lehké distorze zápěstí.
- Doléčení zlomenin po sejmoutí rigidní fixace.
- Bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

- Polyester (PES) 100%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepříkládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo nectitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



*Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta **♂**. Skladujte na suchém místě **¶**, chráněném před přímým slunečním zářením **☀**.*




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobcu a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

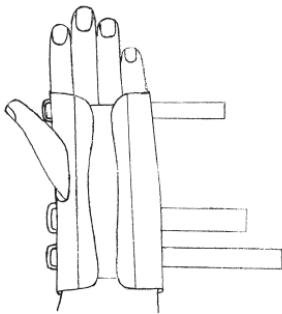

1

Rozepněte všechny pásky.
Duralová dlaha může být
tvarována dle potřeby odborným
personálem. Vsuňte postiženou
ruku do ortézy.

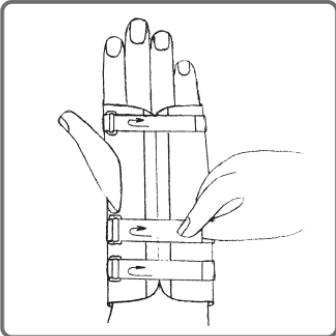

2

Zapněte pásky a regulujte
dotažení.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže
a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.

